

 SCHILLER FRANCE S.A.S.	NOTE DE VERSION		Document	T3-PR5-V1
			Révision	1
			Page	1 / 4

Appareil	AT-180	Ancienne version	1.1.1	Ancienne notice	
Date de sortie	24/05/2024	Nouvelle version	1.1.2	Nouvelle notice	

	Modification matérielle	X	Modification logicielle		Modification notice
--	-------------------------	---	-------------------------	--	---------------------

1 Nouvelles fonctionnalités

2 Améliorations et corrections

2.1 Spike ECG

Le problème pouvant entraîner l'affichage de spikes sur l'ECG sans raison même sur patient non-équipé de pacemaker est désormais corrigé.

3 Sous-systèmes logiciel

Sous-système	Identification	Version
PB-3000	PB-3000_116_124.suo	1.1.6#124

4 Compatibilité

Item	Version	Commentaire
SCHILLER Server	19.10.2 / 23.08	
SEMA CLIENT	19.10.4	
SCHILLER Link	2.1.0	
SCHILLER GATEWAY	22.10.0 / 23.08	

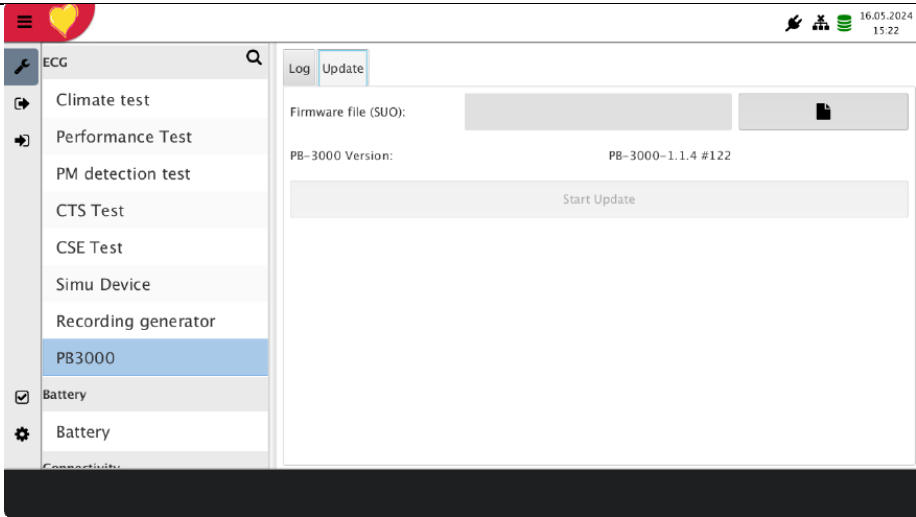
 SCHILLER FRANCE S.A.S.	NOTE DE VERSION		Document	T3-PR5-V1
			Révision	1
			Page	2 / 4

Appareil	AT-180	Ancienne version	1.1.1	Ancienne notice	
Date de sortie	24/05/2024	Nouvelle version	1.1.2	Nouvelle notice	

	Modification matérielle	X	Modification logicielle		Modification notice
--	-------------------------	---	-------------------------	--	---------------------

5 Mise à jour du produit

Important : S'assurer d'être en version 1.1.1 pour effectuer la mise à jour. La mise à jour du logiciel principale (host) reste en version 1.1.1. La mise à jour concerne le sous système PB-3000 intégré à l'appareil.

Etape	Description	Capture écran
1.	Mettre le fichier de mise à jour sur une clé USB. Ouvrir le menu de maintenance. mdp : 7664242	
2.	Se rendre dans le menu PB3000	
3.	Ouvrir l'onglet Update	


Appareil	AT-180	Ancienne version	1.1.1	Ancienne notice	
Date de sortie	24/05/2024	Nouvelle version	1.1.2	Nouvelle notice	

	Modification matérielle	X	Modification logicielle		Modification notice
--	-------------------------	---	-------------------------	--	---------------------

4.	<p>Parcourez et sélectionnez le fichier PB-3000.</p> <p>Après avoir sélectionné le fichier SUO, appuyez sur OK</p>	<div> <div> <div>Select firmware (SUO) file</div> <div> <div>/mnt/usbsda</div> <div> <div>PB-3000_116_124.suo</div> <div>System Volume Information</div> </div> </div> <div> <div>Cancel</div> <div>OK</div> </div> </div> <div> <div> <div> <div>ECG</div> <div> <div>Climate test</div> <div>Performance Test</div> <div>PM detection test</div> <div>CTS Test</div> <div>CSE Test</div> <div>Simu Device</div> <div>Recording generator</div> <div>PB3000</div> <div>Battery</div> <div>Battery</div> </div> </div> <div> <div>Log</div> <div>Update</div> <div> <div>Firmware file (SUO):</div> <div>/mnt/usbsda/PB-3000_116_124.suo</div> <div> <div>PB-3000 Version:</div> <div>PB-3000-1.1.4 #122</div> <div>Start Update</div> </div> </div> </div> </div> </div></div>
5.	<p>Appuyez sur "Démarrer la mise à jour". Le processus de mise à jour démarre</p>	<div> <div> <div> <div>ECG</div> <div> <div>Climate test</div> <div>Performance Test</div> <div>PM detection test</div> <div>CTS Test</div> <div>CSE Test</div> <div>Simu Device</div> <div>Recording generator</div> <div>PB3000</div> <div>Battery</div> <div>Battery</div> </div> </div> <div> <div>Log</div> <div>Update</div> <div> <div>Firmware file (SUO):</div> <div>/mnt/usbsda/PB-3000_116_124.suo</div> <div> <div>PB-3000 Version:</div> <div>PB-3000-1.1.4 #122</div> <div>Start Update</div> </div> <div> <div>Update progress:</div> <div> <div></div> <div>Lähetetään EKG-vahvistimen laiteohjelmisto...</div> </div> </div> </div> </div> </div></div>

Appareil	AT-180	Ancienne version	1.1.1	Ancienne notice	
Date de sortie	24/05/2024	Nouvelle version	1.1.2	Nouvelle notice	

	Modification matérielle	X	Modification logicielle		Modification notice
--	-------------------------	---	-------------------------	--	---------------------

6.	Cliquer sur Ok lorsque le message apparait.	
----	---	--